

Het gebruik van de iQ-clip



**iQ-clip loodrecht op de
paddenstoel aanbrengen**



**spanningsvrij aanbrengen
zonder verdraaiing**



**clip is nu na belasting
volledig vergrendeld**



De gepatenteerde iQ-clip moet loodrecht op de paddenstoel worden aangebracht. Veel andere tilbanden worden in het verlengde van de paddenstoel aangebracht. Dat betekent een andere manier van werken. Hiervoor dienen 2 belangrijke regels:

- De tilband moet spanningsvrij worden aangebracht.
- Niet trekken aan het bandje van de clip, maar de clip met duim en (wijs)vingers bedienen en bevestigen.

De drie innovaties van de iQ-clip



Vast is zeker. De innovatieve, gepatenteerde iQ-clip van UniQare maakt werken met tilliften in de zorg veiliger en ergonomischer voor zowel cliënten als zorgverleners. Dankzij de unieke dubbele beveiliging is losraken van deze universele tilband uitgesloten. Bovendien is onjuist gebruik met fysieke overbelasting niet mogelijk. De UniQare tilband met iQ-clip is universeel, dus bruikbaar op elke tillift met clipsysteem.

Innovatie 1: Dubbele veiligheid

- Clip sluit door veertje in de iQ-clip.
- Gewicht aan de tilband zorgt voor een vergrendeling van de iQ-clip.

Innovatie 2: Menselijk falen uitgesloten

- De iQ-clip zit vast of zit los, schijnveiligheid is niet mogelijk.

Innovatie 3: Ergonomisch werken

- De banden van de tilband moeten vrij zijn van spanning, voor het juist aansluiten en losmaken van de iQ-clip. Hierdoor wordt onjuist gebruik van de clips, dat gepaard gaat met fysieke overbelasting, ontmoedigd.

