


## Gebruikershandleiding: tilbanden voor passieve liften – Nederlands


### Standaard

**REF**  
3010905  
3010904

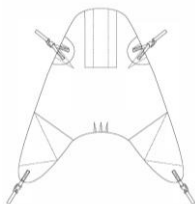


### Amputatie

**REF**  
3010154  
3010155  
3010158

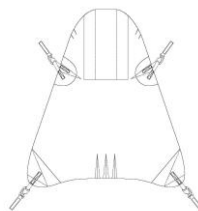


### Verblijfsband

**REF**  
3010188  
3010911

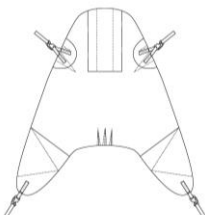


### Toilet

**REF**  
3010960

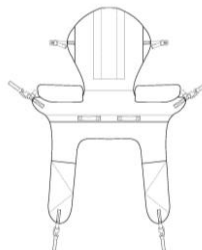

### Antispasme

**REF**  
3010193  
3010103  
3010912

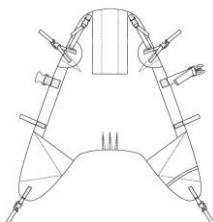


### Longseat

**REF**  
3010931  
3010934



### Bariatrisch

**REF**  
30101200

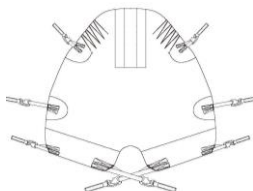

**REF**

Alles:  
30101200:



230 kg  
350 kg

**MD**

**CE UK CA**

## Passieve tilbanden

De mobiliteit van de patiënt staat centraal bij elk hulpmiddel dat United Care ontwerpt en ontwikkelt. Zo natuurlijk mogelijk kunnen bewegen is het uitgangspunt. Daarom heeft United Care samen met Uniqare verschillende tilbanden ontwikkeld die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de patiënt. Onze tilbanden zijn te gebruiken met mobiele tilliften en plafondliften en ondersteunen het lichaam van de patiënt optimaal tijdens het tillen en verplaatsen. Het materiaal, de pasvorm en het ontwerp van de tilbanden spelen een belangrijke rol bij het veilig en comfortabel verplaatsen van de patiënt.

Benieuwd naar de andere oplossingen van United Care? Bezoek [www.united-care.com](http://www.united-care.com).



# 1 Beoogd gebruik, gebruiker en omgeving

Passieve tilbanden zijn bedoeld als accessoire voor plafondliften en mobiele tilliften bij het tillen en verplaatsen van patiënten/bewoners met verminderde spierkracht. In deze gebruikershandleiding worden patiënten en bewoners patiënten genoemd.

Sommige tilbanden zijn bedoeld voor specifieke activiteiten, zoals:

- Alle tilbanden die zijn ontworpen met de stof polyester netstof zijn bedoeld voor gebruik bij bad, douche of zwemactiviteiten in een chloorvrije omgeving.
- De toiletbanden zijn bedoeld om de toiletgang voor de patiënt en het verplegend personeel te vergemakkelijken. In tegenstelling tot de andere tilbanden moet de patiënt voor de toiletband voldoende kracht in het bovenlichaam hebben, vooral in het schoudergebied.
- De anti-spasme tilbanden hebben extra steunbanden en zijn bedoeld voor veilig gebruik bij patiënten met spasmen, extreme bewegelijkheid of dystonie.
- De tilbanden voor langdurig gebruik zijn bedoeld om de patiënt te ondersteunen bij til- en transferactiviteiten en om onder de patiënt te laten liggen voor gebruik in bed of rolstoel gedurende langere perioden tot enkele uren.

De tilbanden zijn allemaal bedoeld voor gebruik door zorgverleners, zowel met als zonder afgeronde medische en niet-medische opleiding die een training hebben gevolgd om zorg te verlenen aan de patiënt. Alle passieve tilbanden zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis in de thuiszorg en professionele zorginstellingen.

Het maximale beoogde gewicht voor de patiënt staat aangegeven op het productlabel. Er is geen aangegeven minimumgewicht voor de patiënt.

## 2 Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

Het niet in acht nemen van de volgende aandachtspunten en de verdere beschrijvingen in deze handleiding kan leiden tot gevaarlijke situaties. Onjuist en onzorgvuldig gebruik kan schade aan het apparaat veroorzaken en dus ook tot gevaarlijke situaties leiden. Stop in dergelijke situaties met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de leverancier.

### Contra-indicaties

- Het apparaat mag niet worden gebruikt voor patiënten boven het maximale patiëntgewicht dat is aangegeven op het etiket van het apparaat en in deze gebruikershandleiding (gebruiksaanwijzing/IFU).
- Dit product is alleen bedoeld voor het verplaatsen van patiënten. Ander gebruik is niet toegestaan.
- Alle tilbanden zijn niet bedoeld voor langdurige transfers, alleen voor korte transfers.

### Voorzorgsmaatregelen

- Controleer de toestand en werking van de tilband voor elk gebruik. Inspecteer het product altijd na het wassen.

- Controleer regelmatig of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of vervaagd is. Als er zichtbare tekenen van schade zijn, neem dan contact op met de klantenservice van United Care.
- Belast het apparaat en controleer of de clips, handgrepen, enz. de belasting kunnen weerstaan.
- Controleer altijd of de tilband correct is aangebracht op het tiljuk voordat u de patiënt optilt.
- Om ongemak en het risico dat de patiënt uit de tilband glijdt te voorkomen, moet de tilband zorgvuldig worden aangemeten.
- Het is niet toegestaan om het apparaat op enigerlei wijze aan te passen.
- Gebruik alleen veilige combinaties van tilbanden, tilliften en jukken. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van United Care.

### **Waarschuwingen**

- De zorgverlener moet de IFU van het product kunnen lezen en begrijpen.
- Het is belangrijk om alleen goedgekeurde accessoires te gebruiken zoals aangegeven in de IFU.
- Zorgverlener: Gebruik het apparaat nooit als je geen goede training hebt gehad over het gebruik van het apparaat en de accessoires.
- Onderhoudspersoneel: Onderhoud het apparaat nooit als u geen goede training hebt gehad over het gebruik en onderhoud van het apparaat en de accessoires.
- Informeer of een patiënt mag worden opgetild. Sommige patiënten mogen alleen worden opgetild met specifieke typen tilband.
- Laat een patiënt nooit zonder toezicht in de tilband.
- Met uitzondering van tilbanden van polyesternet mogen tilbanden niet in het water worden gelaten of onder de douche worden gebruikt.
- De tilband mag niet worden achtergelaten of bewaard in een vochtige of natte omgeving.
- De tilband mag niet buiten worden gebruikt, alleen binnen.



### **Lees altijd de gebruikershandleiding**


Zorg er altijd voor dat je de juiste versie van de handleiding hebt. De meest recente versie van alle handleidingen kunt u downloaden op/vanaf onze website:

### 3 Maattabel

Opgeleid personeel moet altijd de juiste tilbandmaat kiezen voor elke patiënt. Proefpassen is altijd nodig om een tilband met de juiste maat te kiezen. De twee hieronder beschreven metingen geven een goede indicatie voor het kiezen van een tilbandmaat.

Volg de onderstaande checklist:

- Vraag de patiënt om een zittende houding aan te nemen. Controleer vervolgens de afmetingen van de patiënt door de volgende afstanden te meten:
  - De afstand van de billen van de patiënt tot de kruin van het hoofd
  - De afstand tussen de heupen
- Als dit niet mogelijk is omdat de patiënt niet in een zittende houding kan zitten, vraag en help de patiënt dan om een zijligging aan te nemen met de benen opgetrokken. Voer dezelfde metingen uit als hierboven aangegeven.

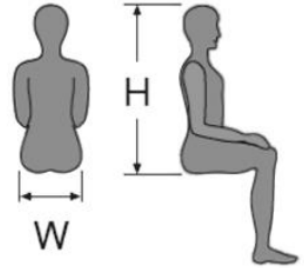

De maataanduiding is terug te vinden in de maattabel. Alle tilbanden hebben een kleurlabel op de rug bij het hoofdgedeelte en een gekleurde clip, passend bij de kleur van de maat. De maat en het type tilband staan vermeld op het productlabel.

Verander de geselecteerde maat van een tilband voor een bepaalde patiënt niet, tenzij specifiek aanbevolen en geselecteerd door een getrainde professional.


Grootte Aantal	Maat Code	Kleurcode	Kroon tot bil (H)	Heupen (W)
0	XXS	PURPLE	45-60cm	20-28cm
1	XS	BRUIN	60-80cm	25-36cm
2	S	ROOD	80-87cm	36-40cm
3	M	GEEL	85-90cm	38-45cm
4	L	GROEN	90-97cm	42-48cm
5	XL	BLAUW	95-102cm	47-58cm
6	XXL	ORANJE	102-106cm	57-63cm

### 4 Aanbrengen en verwijderen van tilbanden

Controleer voor gebruik of

- De tilband compatibel is met de beoogde hijsapparatuur. Zie sectie 6 voor compatibele apparaten.
- Het gewicht van de patiënt is niet hoger dan het maximale gewicht zoals aangegeven op het etiket. Houd rekening met de combinatie van de apparaten: gebruik altijd het laagste aangegeven maximale patiëntgewicht.

- Er zijn geen scheuren, rafels, gaten of algemene slijtage van de tilband. Controleer vooral het materiaal van de banden zoals aangegeven in de afbeeldingen rechts. Als deze tekenen van slijtage vertonen, moet het product worden weggegooid.

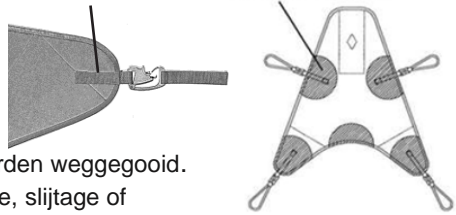

- Er zijn geen tekenen van structurele schade, slijtage of algemene verslechtering van het materiaal op de clips.
- Er kan geen onverwachte verkleuring van het product worden waargenomen
- Labels zijn zichtbaar en leesbaar



*Voordat je een patiënt overplaatst, moet je ervoor zorgen dat de kamer vrij is van obstakels.*

### **Aanbrengen van de tilband wanneer de patiënt zit**

1. Leg de patiënt altijd duidelijk uit wat er tijdens elke stap gaat gebeuren.
2. Breng de tilband aan op de rug van de patiënt langs de zitting van de stoel.
3. Zorg ervoor dat de plastic inzetstukken (baleinen) in de tilbandentilband zitten, als ze nodig zijn.
4. Vraag de patiënt om voorzichtig naar de voorkant van de stoel te gaan. Als de patiënt niet naar voren kan bewegen, vraag hem/haar dan om naar voren te buigen in de richting van de knieën.
5. Breng de tilband zo aan dat de labels aan de buitenkant zitten.
6. Leid beide beensteunen van de tilband langs de benen van de patiënt naar de knieën.
7. Trek hierna beide beensteunen iets naar voren. Hierdoor zit de patiënt al 'in' de tilband.
8. Til een been van de patiënt op en breng een beensteun aan onder het been naar de binnenkant van het been.
9. Breng vervolgens de andere beensteun op dezelfde manier aan.
10. Stel indien nodig de hoofdondersteuning van de tilband op de juiste hoogte in: de hoofdondersteuning moet zich op dezelfde hoogte bevinden als waar het hoofd eindigt.
11. Bevestig de tilband aan op de lift: Zie hoofdstuk 5 "Bevestigen op het tiljuk". Kantel het tiljuk om de zitpositie aan te passen.



Let op: Bij gebruik van een tweepunts tiljuk moeten de beensteunen van de tilband met lussen kruislinks worden aangebracht. De linkerbeensteun moet aan de rechterhaak van het tiljuk worden bevestigd en de rechterbeensteun aan de linkerhaak van het tiljuk.



*Zorg ervoor dat de tilband goed is bevestigd voordat u verder gaat met tillen.*

12. Zorg ervoor dat de ledematen en het haar van de patiënt niet bekneld raken.
13. Controleer de positie van de armen van de patiënt.
  - a. Bij standaard tilbanden plaatst u de armen van de patiënt in de tilband, bijvoorbeeld op de schoot van de patiënt.
  - b. In het geval van toilettilbanders moeten de armen van de patiënt buiten de tilband worden geplaatst.
14. Pak de handbediening van de lift en ga zo dicht mogelijk bij de patiënt staan. Beweeg de lift iets omhoog om de spanning op alle clips of lussen te verhogen.
15. Controleer nogmaals alle bevestigingspunten, banden met clips, patiënte ledematen, haar en zorg ervoor dat de tilband niet vastzit achter een ander voorwerp.
16. Vertel de patiënt dat het tillen zal beginnen.
17. Til de patiënt omhoog. Stop voordat u verder gaat en controleer alle bevestigingspunten, de spanning in de tilband en banden met clips/lussen, de ledematen en het haar van de patiënt, en zorg ervoor dat de tilband niet vastzit in een ander voorwerp.

### **Verwijdering van de tilbandtilband wanneer de patiënt zit**

1. Maak de tilband los van het tiljuk.
2. Vouw de beensteunen van de tilband om.
3. Schuif de beensteunen onder de gebruiker naar de buitenkant van het bovenbeen.
4. Trek de tilbandtilband over de rug van de patiënt.

### **Aanbrengen van de tilbandtilband wanneer de patiënt ligt**

1. Draai de patiënt naar je toe.
2. Plaats de tilband zo dat het productlabel naar het onderliggende oppervlak is gericht.
3. Zorg ervoor dat het middengedeelte van de tilband de ruggengraat volgt.
4. Plaatsing van de tilband:
  - Standaard tilband: De bovenrand van het ruggedeelte van de tilband moet zich op schouderhoogte bevinden en de onderrand ongeveer 2 cm boven het stuitje.
  - Verblijfstilband: De bovenrand van de tilband moet zich op schouderhoogte bevinden en de onderrand - volledig onder de billen.
5. Plaats de tilband zo ver mogelijk onder de patiënt.
6. Duw de lus van het ruggedeelte naar beneden, zodat deze bereikbaar is als de patiënt in de tilband wordt gedraaid.
7. Plaats de beensteunen tussen de knieën van de patiënt wanneer de patiënt naar u toe gedraaid is.
8. Trek de beensteunen naar voren als u de patiënt weer in de tilband draait.
9. Trek de hoofdondersteuning, het ruggedeelte en de beensteun naar buiten.
10. Kruis de beensteunen en bevestig ze aan het tiljuk.
11. Zorg ervoor dat de ledematen en het haar van de patiënt niet bekneld raken
12. Pak de handbediening van de lift en ga zo dicht mogelijk bij de patiënt staan. Beweeg de lift iets omhoog om de spanning op alle clips of lussen te verhogen.
13. Controleer nogmaals alle bevestigingspunten, banden met clips, patiënte ledematen, haar en zorg ervoor dat de tilband niet vastzit achter een ander voorwerp.
14. Vertel de patiënt dat het tillen zal beginnen.
15. Til de patiënt omhoog. Stop voordat u verder gaat en controleer alle bevestigingspunten, de spanning in de tilband en banden met clips/lussen, de ledematen en het haar van de patiënt, en zorg ervoor dat de tilband niet vastzit in een ander voorwerp.

## Verwijdering van de tilband wanneer de patiënt ligt

1. Maak de tilband los van het tiljuk.
2. Vouw de beensteunen van de tilband om.
3. Schuif de beensteunen onder de gebruiker naar de buitenkant van het bovenbeen.
4. Draai de patiënt naar je toe en vouw de tilband onder de patiënt.
5. Draai de patiënt terug en trek de tilband naar je toe.

## 5 Bevestiging tilband aan tiljuk

### Aanbrengen van de tilbanden op de tillift

Tilbanden met UCP-clips of iQ-clips worden bevestigd aan een elektrisch kantelbare of volledig mechanische 4-punts of 8-punts tiljuk (bariatrische tilband) met aangewezen bevestigingspunten voor clips.


Clips worden op tilbandentilbanden geplaatst om de banden op een eenvoudige maar veilige manier te verbinden met de hijsarm van de tillift. De clip is daarom essentieel voor een veilige transfer en moet altijd met aandacht en zorg worden aangesloten.



*Controleer voor het tillen altijd of de clips goed vastzitten. Zorg ervoor dat de banden de clips niet gedraaid zijn.*

### UCP-clip Bevestiging:


Voordat je de clip aanbrengt (en verwijdert), moet je ervoor zorgen dat de spanning van de tilband af is. Houd de band van de clip met één hand vast en trek het grote gat van de clip over de kop van het ophangpunt, controleer of de band (waar de clip aan de tilband is bevestigd) niet gedraaid is. Neem de band onder de clip van de tilband en trek deze naar beneden. Trek aan de clip van de tilband zodat het ophangpunt in de kleinere opening van de clip komt. Het ophangpunt zit nu vergrendeld in de opening bovenaan de clip.

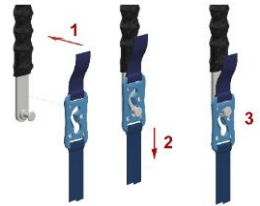

### iQ clip Bevestiging:

Voordat je de clip aanbrengt (en verwijdert), moet je ervoor zorgen dat de spanning van de tilband af is. Houd de clip met één hand vast en duw de vergrendeling open met de duim. Je kunt de clip ook over de pen drukken in plaats van deze eerst te openen.

Controleer of de band waarmee de clip aan de tilband is bevestigd, niet gedraaid is. Haak de clip over het ophangpunt en trek hem naar beneden. De clip klikt vast.

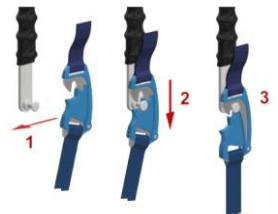

Voor zowel UCP als iQ clips: Zodra de patiënt 10-15 cm boven het bed, de stoel of de rolstoel is, controleer dan nogmaals of de clips van de tilband goed vastzitten aan de vier ophangpunten van de tillift.

### UCP Clip losmaken

1. Zorg ervoor dat het gewicht van de patiënt geen spanning uitoefent op het



- tiljukverbinding en dat debanden los zijn. Trek de band met de clip omhoog, zodat de kop van het ophangpunt op de takel naar de grote opening van de clip beweegt.
2. Maak nu de clip los van het ophangpunt door de clip naar je toe te trekken.

### iQ Clip losmaken

1. Zorg ervoor dat het gewicht van de patiënt geen spanning uitoefent op de tilbandverbinding. Open de iQ-clip. Door de dubbele beveiliging van de iQ-clip gaat deze niet open als de band strak gespannen is.
2. Verwijder de clip van het ophangpunt.

### **Aanbrengen van de lus-tilbanden aan de tillift**

Tilbanden met lusophanging mogen alleen worden gebruikt met 2-punts of 4-punts tiljucken met haken. Elke lus bestaat uit verschillende gekleurde lussen in blauw, roze, grijs en wit voor een correcte liggende, zittende of staande positie van de patiënt.

1. Bevestig de lussen aan de 2 of 4 haken op het tiljuk. Bij gebruik van de passieve 2-punts tiljuk moeten de beenlussen gekruist worden.
2. Controleer of de lussen goed op het bevestigingspunt zitten en niet gedraaid zijn.
3. Zodra de patiënt 10-15 cm boven het bed, de stoel of de rolstoel is, controleer dan nogmaals of de lussen van de tilband goed vastzitten aan de ophangpunten van de tillift.

De lus-tilbanden losmaken:

Zorg ervoor dat het gewicht van de patiënt geen spanning uitoefent op het tiljukverbinding en dat de lussen zijn losgemaakt. Verwijder de lussen één voor één uit de takel

### **Gebruik van kunststof inzetstukken/baleinen**

Plastic inzetstukken worden gebruikt om extra steun te geven. Om in te brengen, leg je de tilband op een plat oppervlak met de openingen voor de inzetstukken naar boven. Duw de plastic inzetstukken/baleinen voorzichtig aan totdat ze goed passen.

Zorg ervoor dat het juiste formaat inzetstuk wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat er plastic baleinen van Uniqare worden gebruikt. Controleer het United Care/Uniqare-merk en een datumstempel op de plastic balein voordat deze wordt gebruikt.



## 6 Compatibele liften

Controleer voor gebruik de compatibiliteit met de tilliften en tiljucken. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van United Care Products. Alle lus-tilbanden zijn compatibel met 2-punts tiljucken van United Care en SystemRomedic. Alle Clips-tilbanden zijn compatibel met 4-punts tiljucken van United Care. Voor het volledige productoverzicht inclusief artikelnummers, zie hoofdstuk 16 "Productlijst". Neem in geval van combinatie met andere tiljucken contact op met de United Care Product Customer Service of voer compatibiliteitstesten uit in uw eigen instelling.

### UCP- en iQ- clip tilbanden compatibiliteitsmatrix met de United Care liften

Liften met tiljuk voor clip-tilband		Toepasbare maten van de verschillende tilband productfamilies						
Naam lift	Liften art nr	Standaard	Amputatie	Verblijfsband	Toiletband	Anti-Spasme	Long seat	Bariatrisch
Wendy 3 elektrische tiljuk	11000530 11000590 11000650	S-XXL	M-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	
Wendy 3 balans tiljuk	11000550 11000610 11000670	S-XXL	M-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	
Wendy 3 met elektrische tiljuk voor kinderen	11000800	XXS-XS		XXS-XS	XXS-XS	XXS-XS	XXS-XS	
WendyDrive met elektrische tiljuk	11000730	S-XXL	M-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	
Tilly met elektrische tiljuk	11000480	S-XXL	M-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	
Tilly met evenwichtsbalk	11000481	S-XXL	M-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	
Tracey met elektrische tiljuk	22000020	S-XXL	M-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	
Sherpa/OT met elektrische tiljuk	17000430 17000470	S-XXL	M-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	
Sherpa/OT met evenwichtsbalk	17000440 17000480	S-XXL	M-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	S-XXL	
Sherpa/OT met elektrische tiljuk voor kinderen	17000500 17000530	XXS-XS		XXS-XS	XXS-XS	XXS-XS	XXS-XS	
Sherpa met bariatrische elektrische tiljuk	17000510							XXL

### Lussen tilbanden compatibiliteitsmatrix met United Care en SystemRomedic liften

Liften met tiljucken voor lussen		Toepasbare maten van de verschillende tilband productfamilies	
Naam lift	Liften art nr	Verblijfsband	Anti-Spasme
Wendy met 2-punts tiljuk	11000510	XXS-XXL	XXS-XXL
WendyDrive met 2-punts tiljuk	11000720	XXS-XXL	XXS-XXL
Tilly met 2-punts tiljuk	11000482	XXS-XXL	XXS-XXL
Sherpa/OT met 2-punts tiljuk	17000380 17000381 17000410	XXS-XXL	XXS-XXL

	17000450		
Sherpa met spin tiljuk 230 kg	17000460	XXS-XXL	XXS-XXL
Sherpa met spin tiljuk 400 kg	17000520	XXS-XXL	XXS-XXL
SystemRomedic tilliften Eva, Vega, Carina, RiseAtlas en RiseBasic		XXS-XXL	XXS-XXL

## 7 Materialen

De Uniqare tilbanden worden gemaakt van verschillende materialen voor verschillende doeleinden. Het specifieke materiaal staat vermeld op het label van elke tilband.

Polyester: Duurzaam materiaal met lage wrijving.

Netstof - Net van polyester: Duurzaam materiaal bedoeld voor baden en douchen.

3D - Polyester: Een luchtig materiaal dat langere tijd onder de patiënt kan blijven.

Bamboe - Een mix van bamboe en polyester: Een zacht en comfortabel materiaal dat geschikt is voor langdurig gebruik.

## 8 Was- en onderhoudsinstructies

60°C 

Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen of bleekmiddel bevatten.

Gebruik geen wasverzachter die oplosmiddelen of bleekmiddel bevat.

Om de levensduur van het product te verlengen, gebruik je een waszak en vermijd je drogen in de droogtrommel.

Verwijder de plastic inzetstukken/baleinen voor het wassen en plaats ze direct daarna terug.

## 9 Opslagomstandigheden

Niet nat opbergen.

Niet bewaren in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.

Het product kan worden opgevouwen voor transportdoeleinden; het wordt aanbevolen om de uitstekende delen eerst naar binnen te vouwen zodat ze beschermd zijn tijdens transport.

Niet bewaren met scherpe voorwerpen.

Niet bewaren bij hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid. De draagbanden moeten worden vervoerd en opgeslagen bij -10°C tot +50°C en bij een normale luchtvochtigheid van 30% -75%.

## 10 Periodieke inspectie

Een inspectie moet minstens één keer per jaar worden uitgevoerd door getraind personeel. Gebruik geen tilbanden tenzij ze na inspectie geschikt zijn bevonden voor gebruik bij een patiënt door het getrainde personeel. Er moet een logboek worden

bijgehouden en het productlabel moet worden gemarkeerd om deze inspecties te registreren.

Tilbanden moeten worden weggegooid als:

- Een label is onleesbaar geworden
- De clips, riemen of lussen tekenen vertonen van beschadiging of slijtage
- De rand van de tilband tekenen vertoont van beschadiging of slijtage
- Scheuren aanwezig zijn
- Gaten aanwezig zijn
- Er is sprake van onverwachte verkleuring
- Loszittende stiksels

Als u hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de United Care Klantenservice of de regiomanager in uw regio.

## 11 Problemen oplossen

Als het product niet goed werkt, controleer dan het volgende:

Klacht	Mogelijke oorzaak	Actie
De clip vergrendelt niet	Kapotte clip Kapot bandje	Tilband vervangen
iQ clip gaat niet open bij het losmaken	Er staat nog spanning op de band bij het openen van de IQ clip Scharnier is kapot of werkt niet goed	Laat de lift zakken en zorg ervoor dat de spanning van de banden loskomt. De tilband vervangen
UCP-clip kan niet worden bevestigd	Verkeerde tillift of verkeerd tiljuk wordt gebruikt	Controleer de compatibiliteit van het tilbandbevestiging en de tillift
De tilband past niet	Verkeerde maat	Controleer de maatsectie en pas indien nodig de tilbandmaat aan
Tilband heeft een paarse kleur	Tilband is gewassen met bleekmiddel	De tilband vervangen
Tilband ruikt vies of ziet er vies uit	Niet goed of vaak genoeg gewassen	De tilband wassen
De hoofd- en neksteun van de tilband biedt niet genoeg ondersteuning	Kapotte plastic inzetstukken/baleinen Afwezigheid van plastic inzetstukken/baleinen in de tilband Tilband is te laag aangebracht	Bestel nieuwe plastic inzetstukken/baleinen en vervang Plaats de plastic inzetstukken/baleinen in de daarvoor bestemde vakken Pas de positie van de tilband aan

## 12 Levensduur van de tilband











De productiedatum staat op het productlabel. Bij normaal gebruik (twee wasbeurten per week) is de verwachte levensduur twee jaar. De totale levensduur is echter afhankelijk van het gebruik, het onderhoud en de opslag van het product. Daarom wordt een visuele inspectie aanbevolen voor elk gebruik, zie sectie Voor gebruik onder hoofdstuk 4.

Als een van deze punten van toepassing is of bij twijfel over de staat van de tilband, moet het product worden weggegooid om de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Afgedankte producten kunnen worden gerecycled als plastic volgens de plaatselijke autoriteiten.

## 13 Garantie

Uniqare Quality Slings BV/United Care Products BV geeft 1 jaar garantie op de tilbanden. De garantie geldt niet op onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage of onzorgvuldig gebruik. Verder geldt de garantie niet voor schade of gebreken aan het product die kunnen ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling ligt bij United Care Products BV of bij een door United Care Products BV aan te wijzen vertegenwoordiger.

## 14 Symbooltabel

	Dit product voldoet aan de vereisten van de Medical Device Regulation 2017/745		Visuele inspectie
	Medisch apparaat		Lees de handleiding
	Let op		Referentienummer (artikelnummer van het product)
	Fabrikant informatie		Serienummer
	Klasse I product voor medische hulpmiddelen dat voldoet aan de vereisten van UK MDR 2002 voor medische hulpmiddelen (MDD 93/42/EEC)		Maximaal toelaatbaar gewicht/ belasting patiënt/bewoner.

## 15 Een incident melden

Een ernstig ongeval dat heeft plaatsgevonden in relatie tot het hulpmiddel, moet gemeld worden bij de fabrikant en de of een andere bevoegde autoriteit van het land waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

## 16 Productlijst

### Standaard tilband

Art. nr.	Beschrijving
30109050C	Standaard, Polyester, UCP-clip, XXS
30109051C	Standaard, Polyester, UCP-clip, XS
30109052C	Standaard, Polyester, UCP-clip, S
30109053C	Standaard, Polyester, UCP-clip, M
30109054C	Standaard, Polyester, UCP-clip, L
30109055C	Standaard, Polyester, UCP-clip, XL
30109056C	Standaard, Polyester, UCP-clip, XXL
30109050Q	Standaard, Polyester, IQ-clip, XXS
30109051Q	Standaard, Polyester, IQ-clip, XS
30109052Q	Standaard, Polyester, IQ-clip, S
30109053Q	Standaard, Polyester, IQ-clip, M
30109054Q	Standaard, Polyester, IQ-clip, L
30109055Q	Standaard, Polyester, IQ-clip, XL
30109056Q	Standaard, Polyester, IQ-clip, XXL

Art. nr.	Beschrijving
30109040C	Standaard, Netstof, UCP-clip, XXS
30109041C	Standaard, Netstof, UCP-clip, XS
30109042C	Standaard, Netstof, UCP-clip, S
30109043C	Standaard, Netstof, UCP-clip, M
30109044C	Standaard, Netstof, UCP-clip, L
30109045C	Standaard, Netstof, UCP-clip, XL
30109046C	Standaard, Netstof, UCP-clip, XXL
30109040Q	Standaard, Netstof, IQ-clip, XXS
30109041Q	Standaard, Netstof, IQ-clip, XS
30109042Q	Standaard, Netstof, IQ-clip, S
30109043Q	Standaard, Netstof, IQ-clip, M
30109044Q	Standaard, Netstof, IQ-clip, L
30109045Q	Standaard, Netstof, IQ-clip, XL
30109046Q	Standaard, Netstof, IQ-clip, XXL

### Amputatie tilband

Art. nr.	Beschrijving
30101543C	Amputatie, Netstof, UCP-clip, M
30101544C	Amputatie, Netstof, UCP-clip, L
30101545C	Amputatie, Netstof, UCP-clip, XL
30101546C	Amputatie, Netstof, UCP-klem, XXL
30101543Q	Amputatie, Netstof, IQ-clip, M
30101544Q	Amputatie, Netstof, IQ-clip, L
30101545Q	Amputatie, Netstof, IQ-clip, XL
30101546Q	Amputatie, Netstof, IQ-clip, XXL
30101553C	Amputatie, Bamboe, UCP-clip, M
30101554C	Amputatie, Bamboe, UCP-clip, L
30101555C	Amputatie, Bamboe, UCP-clip, XL
30101556C	Amputatie, Bamboe, UCP-clip, XXL

Art. nr.	Beschrijving
30101553Q	Amputatie, Bamboe, IQ-clip, M
30101554Q	Amputatie, Bamboe, IQ-clip, L
30101555Q	Amputatie, Bamboe, IQ-clip, XL
30101556Q	Amputatie, Bamboe, IQ-clip, XXL
30101583C	Amputatie, 3D, UCP-clip, M
30101584C	Amputatie, 3D, UCP-clip, L
30101585C	Amputatie, 3D, UCP-clip, XL
30101586C	Amputatie, 3D, UCP-clip, XXL
30101583Q	Amputatie, 3D, IQ-clip, M
30101584Q	Amputatie, 3D, IQ-clip, L
30101585Q	Amputatie, 3D, IQ-clip, XL
30101586Q	Amputatie, 3D, IQ-clip, XXL

### Verblijfsband

Art. nr.	Beschrijving
30101880C	Verblijfsband, Bamboe, UCP-clip, XXS
30101881C	Verblijfsband, Bamboe, UCP-clip, XS
30101882C	Verblijfsband, Bamboe, UCP-clip, S

Art. nr.	Beschrijving
30109110C	Verblijfsband, 3D, UCP-clip, XXS
30109111C	Verblijfsband, 3D, UCP-clip, XS
30109112C	Verblijfsband, 3D, UCP-clip, S

30101883C	Verblijsband, Bamboe, UCP-clip, M
30101884C	Verblijsband, Bamboe, UCP-clip, L
30101885C	Verblijsband, Bamboe, UCP-clip, XL
30101886C	Verblijsband, Bamboe, UCP-clip, XXL
30101880Q	Verblijsband, Bamboe, IQ-clip, XXS
30101881Q	Verblijsband, Bamboe, IQ-clip, XS
30101882Q	Verblijsband, Bamboe, IQ-clip, S
30101883Q	Verblijsband, Bamboe, IQ-clip, M
30101884Q	Verblijsband, Bamboe, IQ-clip, L
30101885Q	Verblijsband, Bamboe, IQ-clip, XL
30101886Q	Verblijsband, Bamboe, IQ-clip, XXL
30101880P	Verblijsband, Bamboe, Lussen, XXS
30101881P	Verblijsband, Bamboe, Lussen, XS
30101882P	Verblijsband, Bamboe, Lussen, S
30101883P	Verblijsband, Bamboe, Lussen, M
30101884P	Verblijsband, Bamboe, Lussen, L
30101885P	Verblijsband, Bamboe, Lussen, XL
30101886P	Verblijsband, Bamboe, Lussen, XXL

30109113C	Verblijsband, 3D, UCP-clip, M
30109114C	Verblijsband, 3D, UCP-clip, L
30109115C	Verblijsband, 3D, UCP-clip, XL
30109116C	Verblijsband, 3D, UCP-clip, XXL
30109110Q	Verblijsband, 3D, IQ-clip, XXS
30109111Q	Verblijsband, 3D, IQ-clip, XS
30109112Q	Verblijsband, 3D, IQ-clip, S
30109113Q	Verblijsband, 3D, IQ-clip, M
30109114Q	Verblijsband, 3D, IQ-clip, L
30109115Q	Verblijsband, 3D, IQ-clip, XL
30109116Q	Verblijsband, 3D, IQ-clip, XXL
30109110P	Verblijsband, 3D, Lussen, XXS
30109111P	Verblijsband, 3D, Lussen, XS
30109112P	Verblijsband, 3D, Lussen, S
30109113P	Verblijsband, 3D, Lussen, M
30109114P	Verblijsband, 3D, Lussen, L
30109115P	Verblijsband, 3D, Lussen, XL
30109116P	Verblijsband, 3D, Lussen, XXL

### Toiletband Deluxe

Art. nr.	Beschrijving
30109600C	Toiletband, Polyester, UCP-clip, XXS
30109601C	Toiletbandband, Polyester, UCP-clip, XS
30109602C	Toiletband, Polyester, UCP-clip, S
30109603C	Toiletband, Polyester, UCP-clip, M
30109604C	Toiletband, Polyester, UCP-clip, L
30109605C	Toiletband, Polyester, UCP-clip, XL
30109606C	Toiletband, Polyester, UCP-clip, XXL

Art. nr.	Beschrijving
30109600Q	Toiletband, Polyester, IQ-clip, XXS
30109601Q	Toiletband, Polyester, IQ-clip, XS
30109602Q	Toiletband, Polyester, IQ-clip, S
30109603Q	Toiletband, Polyester, IQ-clip, M
30109604Q	Toiletband, Polyester, IQ-clip, L
30109605Q	Toiletband, Polyester, IQ-clip, XL
30109606Q	Toiletband, Polyester, IQ-clip, XXL

### Anti-Spasme tilband

Art. nr.	Beschrijving
30101930C	Anti-Spasme, Netstof, UCP-clip, XXS
30101931C	Anti-Spasme, Netstof, UCP-clip, XS
30101932C	Anti-Spasme, Netstof, UCP-clip, S
30101933C	Anti-Spasme, Netstof, UCP-clip, M
30101934C	Anti-Spasme, Netstof, UCP-clip, L
30101935C	Anti-Spasme, Netstof, UCP-clip, XL
30101936C	Anti-Spasme, Netstof, UCP-clip, XXL
30101930Q	Anti-Spasme, Netstof, IQ-clip, XXS
30101931Q	Anti-Spasme, Netstof, IQ-clip, XS
30101932Q	Anti-Spasme, Netstof, IQ-clip, S
30101933Q	Anti-Spasme, Netstof, IQ-clip, M

Art. nr.	Beschrijving
30109034Q	Anti-Spasme, Bamboe, IQ-clip, L
30109035Q	Anti-Spasme, Bamboe, IQ-clip, XL
30109036Q	Anti-Spasme, Bamboe, IQ-clip, XXL
30109030P	Anti-Spasme, Bamboe, Lussen, XXS
30109031P	Anti-Spasme, Bamboe, Lussen, XS
30109032P	Anti-Spasme, Bamboe, Lussen, S
30109033P	Anti-Spasme, Bamboe, Lussen, M
30109034P	Anti-Spasme, Bamboe, Lussen, L
30109035P	Anti-Spasme, Bamboe, Lussen, XL
30109036P	Anti-Spasme, Bamboe, Lussen, XXL
30109120C	Anti-Spasme, 3D, UCP-clip, XXS



30101934Q	Anti-Spasme, Netstof, IQ-clip, L
30101935Q	Anti-Spasme, Netstof, IQ-clip, XL
30101936Q	Anti-Spasme, Netstof, IQ-clip, XXL
30101930P	Anti-Spasme, Netstof, Lussen, XXS
30101931P	Anti-Spasme, Netstof, Lussen XS
30101932P	Anti-Spasme, Netstof, Lussen, S
30101933P	Anti-Spasme, Netstof, Lussen, M
30101934P	Anti-Spasme, Netstof, Lussen, L
30101935P	Anti-Spasme, Netstof, Lussen, XL
30101936P	Anti-Spasme, Netstof, Lussen XXL
30109030C	Anti-Spasme, Bamboe, UCP-clip, XXS
30109031C	Anti-Spasme, Bamboe, UCP-clip, XS
30109032C	Anti-Spasme, Bamboe, UCP-clip, S
30109033C	Anti-Spasme, Bamboe, UCP-clip, M
30109034C	Anti-Spasme, Bamboe, UCP-clip, L
30109035C	Anti-Spasme, Bamboe, UCP-clip, XL
30109036C	Anti-Spasme, Bamboe, UCP-clip, XXL
30109030Q	Anti-Spasme, Bamboe, IQ-clip, XXS
30109031Q	Anti-Spasme, Bamboe, IQ-clip, XS
30109032Q	Anti-Spasme, Bamboe, IQ-clip, S
30109033Q	Anti-Spasme, Bamboe, IQ-clip, M

30109121C	Anti-Spasme, 3D, UCP-clip, XS
30109122C	Anti-Spasme, 3D, UCP-clip, S
30109123C	Anti-Spasme, 3D, UCP-clip, M
30109124C	Anti-Spasme, 3D, UCP-clip, L
30109125C	Anti-Spasme, 3D, UCP-clip, XL
30109126C	Anti-Spasme, 3D, UCP-clip, XXL
30109120Q	Anti-Spasme, 3D, IQ-clip, XXS
30109121Q	Anti-Spasme, 3D, IQ-clip, XS
30109122Q	Anti-Spasme, 3D, IQ-clip, S
30109123Q	Anti-Spasme, 3D, IQ-clip, M
30109124Q	Anti-Spasme, 3D, IQ-clip, L
30109125Q	Anti-Spasme, 3D, IQ-clip, XL
30109126Q	Anti-Spasme, 3D, IQ-clip, XXL
30109120P	Anti-Spasme, 3D, Lussen, XXS
30109121P	Anti-Spasme, 3D, Lussen, XS
30109122P	Anti-Spasme, 3D, Lussen, S
30109123P	Anti-Spasme, 3D, Lussen, M
30109124P	Anti-Spasme, 3D, Lussen, L
30109125P	Anti-Spasme, 3D, Lussen, XL
30109126P	Anti-Spasme, 3D, Lussen, XXL

## Longseat

Art. nr.	Beschrijving
30109343C	Longseat, Netstof, UCP-clip, M
30109344C	Longseat, Netstof, UCP-clip, L
30109345C	Longseat, Netstof, UCP-clip, XL
30109343Q	Longseat, Netstof, IQ-clip, M
30109344Q	Longseat, Netstof, IQ-clip, L
30109345Q	Longsea, Netstof, IQ-clip, XL

Art. nr.	Beschrijving
30109313C	Longseat, 3D, UCP-clip, M
30109314C	Longseat, 3D, UCP-clip, L
30109315C	Longseat, 3D, UCP-clip, XL
30109313Q	Longseat, 3D, IQ-clip, M
30109314Q	Longseat, 3D, IQ-clip, L
30109315Q	Longseat, 3D, IQ-clip, XL

## Bariatrische tilband

Art. nr.	Beschrijving
30101200C	Bariatrische band, Netstof, UCP-clip, één maat
30101200Q	Bariatrische band, Netstof, IQ-clip, één maat

Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten.

## Over Uniqare

Uniqare Quality Slings ontwikkelt en produceert een groot assortiment tilbanden voor de zorgsector. Als zusteronderneming van United Care levert Uniqare vanzelfsprekend ook kwalitatief hoogstaande producten die voldoen aan de CE richtlijnen. Opgericht in 2016 is Uniqare een jong en dynamisch bedrijf met ervaren, gedreven en betrokken medewerkers.

Van ontwerp, materiaalkeuze tot clip, alles wordt in eigen huis bepaald. Dankzij de jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn onze tilbanden ontwikkeld met het oog op veiligheid en maximaal comfort voor de cliënt en gebruiksgemak voor de zorgverlener. Als innovatief bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in stoffen en andere materialen voor het vervaardigen van onze tilbanden.

Uniqare vervaardigt tilbanden voor de Nederlandse markt en zelfs wereldwijd. Ook zijn er bij ons mogelijkheden om onder private label voor derden een eigen tilbanden lijn te produceren. Mocht u interesse hierin hebben, dan kunt contact met ons opnemen. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.



Medisch hulpmiddel klasse I. Het product voldoet aan de vereisten van de Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



Klasse I product voor medische hulpmiddelen dat voldoet aan de vereisten van UK MDR 2002 voor medische hulpmiddelen (MDD 93/42/EEC)



UniQare Quality Slings B.V.  
Bremenweg 5  
9723 TC Groningen  
Nederland  
+31 (0)50 3050980  
Info@unitedcare.nl  
www.unitedcare.nl

**UK Responsible Person:**

Direct Healthcare Group  
Withey Court, Western Industrial Estate  
Caerphilly CF3 1BF, United Kingdom  
44 (0) 800 043 0881  
www.directhealthcaregroup.com  
Info@directhealthcaregroup.com

