

Gebruiksaanwijzing Tilbanden voor Actieve liften - Nederlands

Lowzone band

REF


10109034



Tilvest

REF

3010035

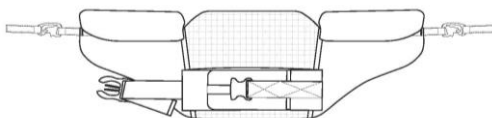

REF

Alle:



230 kg / 507 lbs

MD
CE | UK
CA

IFU nr: 34000210 v1.0_NL 2024-02-23

Tilbanden voor Actieve liften

De mobiliteit van de patiënt staat centraal bij elk hulpmiddel dat United Care ontwerpt en ontwikkelt. Zo natuurlijk mogelijk kunnen bewegen is het uitgangspunt. Daarom heeft United Care samen met Uniqare verschillende tilbanden ontwikkeld die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de patiënt. Onze tilbanden zijn te gebruiken met actieve tilliften en ondersteunen het lichaam van de patiënt optimaal tijdens het tillen en de transfer. Het materiaal, de pasvorm en het ontwerp van de tilbanden spelen een belangrijke rol bij het veilig en comfortabel verplaatsen van de patiënt.

Benieuwd naar de andere oplossingen van United Care? Bezoek www.united-care.com.



1 Beoogd gebruik, gebruiker en omgeving

Actieve tilbanden zijn bedoeld als accessoire voor actieve tilliften bij het tillen en verplaatsen van patiënten/bewoners met verminderde spierkracht. In deze gebruikershandleiding worden patiënten en bewoners patiënten genoemd.

De tilbanden zijn allemaal bedoeld voor gebruik door zorgverleners, zowel met als zonder afgeronde medische en niet-medische opleiding die een training hebben gevolgd om zorg te verlenen aan de patiënt. Alle actieve tilbanden zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis in de thuiszorg en professionele zorginstellingen.

Het maximale beoogde gewicht voor de patiënt staat aangegeven op het productlabel. Er is geen aangegeven minimumgewicht voor de patiënt.

2 Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

Het niet in acht nemen van de volgende aandachtspunten en de verdere beschrijvingen in deze handleiding kan leiden tot gevaarlijke situaties. Onjuist en onzorgvuldig gebruik kan schade aan het apparaat veroorzaken en dus ook tot gevaarlijke situaties leiden. Stop in dergelijke situaties met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de leverancier.

Contra-indicaties

- Het apparaat mag niet worden gebruikt voor patiënten boven het maximale patiëntgewicht dat is aangegeven op het label van de lift en in deze handleiding.
- Dit product is alleen bedoeld voor het verplaatsen en overbrengen van patiënten. Ander gebruik is niet toegestaan.
- Dit product is alleen bedoeld voor patiënten die bij bewustzijn zijn en een verminderde spierfunctie hebben, die worden verzorgd door een zorgverlener en een gewicht hebben van minimaal >25 kg en een lichaamslengte van >150 cm (>130 cm bij gebruik van het voetverhogingsaccessoire). De persoon is in staat om zichzelf rechtop te helpen zitten en deze positie zelfstandig of met behulp van een soort steun zoals een leuning of handgreep te behouden. Enige mate van kracht voor het bovenlichaam of de armen is vereist.
- Alle tilbanden zijn niet bedoeld voor langdurige transfers, alleen voor korte transfers.

Voorzorgsmaatregelen

- Controleer de toestand en werking van de tilband voor elk gebruik. Inspecteer het product altijd na het wassen.
- Controleer regelmatig of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of vervaagd is. Als er zichtbare tekenen van schade zijn, neem dan contact op met de klantenservice van United Care Products.
- Belast het apparaat en controleer of de clips, handgrepen, enz. de belasting aankunnen.
- Controleer altijd of de tilband correct is aangebracht op het tiljuk voordat u de patiënt tilt.

- Om ongemak en het risico dat de patiënt uit de tilband glijdt te voorkomen, moet de tilband zorgvuldig worden aangemeten.
- Het is niet toegestaan om het apparaat op welke manier dan ook aan te passen.
- Gebruik alleen veilige combinaties van tilbanden en liften zoals aangegeven in hoofdstuk 6 van deze handleiding. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van United Care.

Waarschuwingen

- De zorgverlener moet de IFU van het product kunnen lezen en begrijpen.
- Zorgverlener: Gebruik het apparaat nooit als je geen goede training hebt gehad over het gebruik van het apparaat en de accessoires.
- Onderhoudspersoneel: Onderhoud het apparaat nooit als u geen goede training hebt gehad over het gebruik en onderhoud van het apparaat en de accessoires.
- Het is belangrijk om alleen goedgekeurde accessoires te gebruiken zoals aangegeven in de handleiding.
- Informeer of een patiënt opgetild mag worden met de actieve lift.
- Laat een patiënt nooit zonder toezicht in de tilband.
- De tilbanden mogen niet worden gebruikt om te baden of in een douche.
- De tilband mag niet worden achtergelaten of bewaard in een vochtige of natte omgeving.
- De tilband mag niet buiten worden gebruikt, alleen binnen.



Lees altijd de gebruikershandleiding

Zorg er altijd voor dat je de juiste versie van de handleiding hebt. De meest recente versie van alle handleidingen kunt u downloaden op/vanaf onze website: www.united-care.com


3 Maattabel

Opgeleid personeel moet altijd de juiste maat tilband kiezen voor elke patiënt. Proefpassen is altijd nodig om een tilband met de juiste maat te kiezen.

Tilvest

De hieronder beschreven metingen geven een goede indicatie voor het kiezen van een hijsbandmaat. De juiste maat kiezen: Vraag de patiënt om een zittende houding aan te nemen. Meet de taille. De maatindicatie is te vinden in de maattabel hieronder.

| Grootte Aantal | Maat Code | Kleurcode | Taille |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2 | S | ROOD | 58-80 cm |
| 3 | M | GEEL | 74-96 cm |
| 4 | L | GROEN | 94-125 cm |
| 5 | XL | BLAUW | 114-136 cm |
| 6 | XXL | ORANJE | 128-158 cm |

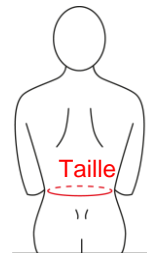

Alle tilbanden hebben een kleurlabel en een gekleurde clip, passend bij de kleur van de maat. De maat en het type tilband staan ook vermeld op het productlabel. Verander de geselecteerde maat van een tilband voor een bepaalde patiënt niet, tenzij specifiek aanbevolen en geselecteerd door een getrainde professional.


Lowzone band

Deze tilband is alleen verkrijgbaar in één maat: de lengte van het hoofdgedeelte van de tilband is 105 cm, exclusief banden met clips.

4 Aanbrengen en verwijderen van tilbanden

Controleer voor gebruik

- De tilband is compatibel met de beoogde tillift. Zie sectie 6 voor compatibele liften.
- Het gewicht van de patiënt is niet hoger dan het maximale gewicht zoals aangegeven op het label. Houd rekening met de combinatie van de apparaten: gebruik altijd het laagste aangegeven maximale patiëntgewicht.
- De patiënt met Tilvest en/of Low-Zone Tilband in de actieve lift mag worden getild.
- Er zijn geen scheuren, rafels, gaten of algemene slijtage van de tilband. Controleer vooral het materiaal van de bandjes zoals aangegeven in de afbeeldingen rechts. Als deze tekenen van slijtage vertonen, moet het product worden weggegooid.
- Er zijn geen tekenen van structurele schade, slijtage of algemene verslechtering van het materiaal op de clips.
- Er is geen verkleuring van de tilband.
- Labels zijn zichtbaar en leesbaar.

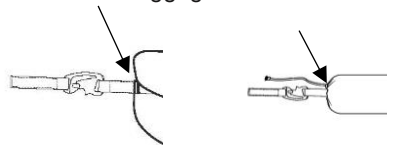

Voorbereiding voor de transfer

1. Voordat je een transfer begint, moet je ervoor zorgen dat de kamer vrij is van obstakels.
2. Leg de patiënt altijd duidelijk uit wat er tijdens elke stap gaat gebeuren.
3. Vraag de patiënt om voorzichtig naar de voorkant van de stoel te gaan. Als de patiënt niet naar voren kan bewegen, vraag hem/haar dan om naar voren te leunen richting de knieën.


Aanbrengen van het Tilvest

1. Breng Tilvest achter de rug van de patiënt aan met het productlabel naar buiten gericht. Het middengedeelte van Tilvest moet de wervelkolom van de patiënt volgen.
2. Plaats de heupriem om het middel van de patiënt. Maak de klittenbanden vast zodat de riem strak zit.
3. Maak de gesp vast aan de veiligheidsgordel en pas deze aan de taille van de patiënt aan door aan de riem te trekken.
4. Plaats de geselecteerde actieve tillift voor de patiënt. Zorg ervoor dat de bandjes met clip het bevestigingspunt op de lift kunnen bereiken.
5. Plaats de voeten van de patiënt op de voetsteun.
6. Zorg ervoor dat de armen van de patiënt buiten de Tilvest zijn geplaatst en dat de okselrollen onder de armen van de patiënt zijn geplaatst. Bevestig vervolgens de Tilvest aan de lift: Zie hoofdstuk 5 "Aansluiten op de tilband".



Aanbrengen van de Low Zone Tilband

1. Breng de Low Zone tilband zo laag mogelijk aan op de onderrug van de patiënt, met het productlabel naar buiten gericht. Het middengedeelte van Low Zone moet op de ruggengraat van de patiënt liggen.
2. Plaats de geselecteerde actieve tillift voor de patiënt. Zorg ervoor dat de bandjes met clips het bevestigingspunt op de lift kunnen bereiken.
3. Plaats de voeten van de patiënt op de voetsteun.
4. Zorg ervoor dat de armen van de patiënt bovenop de Low Zone Tilband worden geplaatst. Bevestig vervolgens de tilband aan de lift: Zie hoofdstuk 5 "Aansluiten op de tilband".

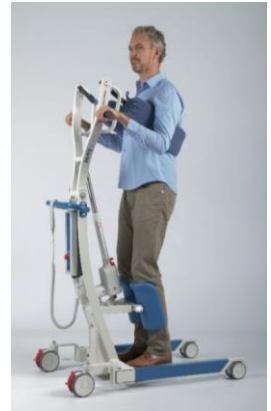

Zorg ervoor dat de tilband goed is bevestigd voordat u verder gaat met tillen.

De patiënt optillen met Tilvest of Low Zone Tilband met een actieve tillift

1. Vraag de patiënt om zijn handen op de handgrepen te plaatsen.
2. Zorg ervoor dat de ledematen en het haar van de patiënt niet bekneld raken.
3. Neem de handbediening van de lift en ga zo dicht mogelijk bij de patiënt staan. Breng de hefarm van de lift iets omhoog om de spanning op alle banden met clips te verhogen.
4. Controleer nogmaals alle bevestigingspunten, bandjes met clips, patiëntenledematen, haar en zorg ervoor dat de tilband niet vastzit in een ander voorwerp.
5. Vraag de patiënt om achterover te leunen tegen de tilband voordat je begint met optillen. Vertel de patiënt dan dat het tillen gaat beginnen.
6. Let goed op de patiënt. Als alles is aangepast en de patiënt zich op zijn gemak voelt, breng je de lift omhoog tot de gewenste hoogte. Stop met omhoog brengen als de patiënt het minste teken van ongemak vertoont.

Tilvest verwijderen als de patiënt zit

1. Maak de tilband los van het tiljuk.
2. Maak de gespen van de veiligheidsgordel los en open de klittenbanden van de heupriem.
3. Verwijder de tilband voorzichtig van de patiënt.

Verwijdering van de Lowzone band wanneer de patiënt zit

4. Maak de tilband los van het tiljuk.
5. Verwijder de tilband voorzichtig van de patiënt.

5 Bevestigen aan het tiljuk

Clips worden op tilbanden geplaatst om de bandjes op een eenvoudige maar veilige manier te verbinden met de hefarm van een tillift. De clip is daarom essentieel voor een veilige transfer en moet altijd met aandacht en zorg worden aangesloten.

Tilvest en Low-Zone zijn uitgerust met UCP-clips of iQ-clips. Deze worden gebruikt om de tilband te bevestigen aan de daarvoor bestemde bevestigingspunten voor clips op de compatibele sta-liften.



Controleer voor het tillen altijd of de clips goed vastzitten. Zorg ervoor dat de bandjes en de clips niet gedraaid zijn.

UCP-clip Bevestiging:

Voordat je de clip aanbrengt (en verwijdert), moet je ervoor zorgen dat de spanning van de tilband af is. Houd de strip van de clip met één hand vast en trek het grote gat van de clip over de kop van het ophangpunt, controleer of het bandje (waar de clip aan de tilband is bevestigd) niet gedraaid is.

Neem het bandje onder de clip van de tilband en trek deze naar beneden. Trek aan de clip van de tilband zodat het ophangpunt in de kleinere opening van de clip komt. Het ophangpunt zit nu vergrendeld in de opening bovenaan de clip.




iQ clip Bevestiging:

Voordat je de clip aanbrengt (en verwijdert), moet je ervoor zorgen dat de spanning van de tilband af is. Houd de clip met één hand vast en duw de vergrendeling open met de duim. Je kunt de clip ook over de pen drukken in plaats van deze eerst te openen.

Controleer of de riem waarmee de clip aan de tilband is bevestigd, niet gedraaid is.

Haak de clip over het ophangpunt en trek hem naar beneden. De clip klikt vast.

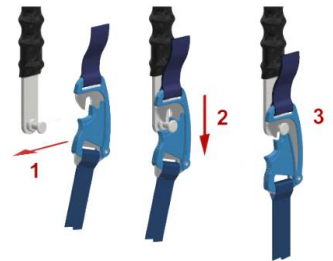

Voor zowel UCP als iQ clips: Zodra de patiënt 10-15 cm boven het bed, de stoel of de rolstoel is, controleer dan nogmaals of de clips van de tilband goed vastzitten aan de twee ophangpunten van de tillift.

UCP Clip losmaken

1. Zorg ervoor dat het gewicht van de patiënt geen spanning uitoefent op het tiljukverbinding en dat de bandjes los zijn. Trek het bandje met de clip omhoog, zodat de kop van het ophangpunt op de tillift naar de grote opening van de clip beweegt.
2. Maak nu de clip los van het ophangpunt door de clip naar je toe te trekken.

iQ Clip losmaken

1. Zorg ervoor dat het gewicht van de patiënt geen spanning uitoefent op de tilbandverbinding en dat de bandjes losgemaakt zijn. Open de iQ-clip. Door de dubbele beveiliging van de iQ-clip gaat deze niet open als het bandjestrak gespannen is.
2. Verwijder de clip van het ophangpunt.

6 Compatibele liften

Controleer voor gebruik de compatibiliteit met de tilliften en tiljucken. Neem bij twijfel contact op met de United Care Products Klantenservice. Alle tilbanden zijn compatibel met United Care actieve liften. Voor het volledige productoverzicht inclusief artikelnummers, zie hoofdstuk 16 "Productlijst". Neem in geval van combinatie met andere tiljucken contact op met de United Care Product Customer Service of voer compatibiliteitstesten uit in uw eigen instelling.

UCP- en iQ clip tilband compatibiliteitsmatrix met de United Care liften

| Liften | | Toepasselijke maten van tilbanden | |
|-------------|---------------|-----------------------------------|----------|
| Naam lift | Liften art nr | Tilvest | Low-zone |
| Jamy 3 | 20000130 | S-XXL | Eén maat |
| Raisa Basic | 20000150 | S-XXL | Eén maat |
| James 3 | 10000070 | S-XXL | Eén maat |

7 Materialen

Uniqare's actieve tilbanden zijn gemaakt van verschillende materialen voor verschillende doeleinden. Het specifieke materiaal staat vermeld op het label van elke tilband.

Tilvest

Standaard - Polyester

Antislip: Polyester en neopentylglycol

3D stof - Polyester

Lowzone band

Schuim: Polyurethaan

Fleece: Polyester

8 Was- en onderhoudsinstructies

60°C 

Gebruik geen spoelmiddelen die oplosmiddelen of bleekmiddel bevatten.

Gebruik geen wasverzachter die oplosmiddelen of bleekmiddel bevat.

Om de levensduur van het product te verlengen, gebruik je een waszak en vermijd je drogen in de droogtrommel.

9 Opslagomstandigheden

Niet nat opbergen.

Niet bewaren in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.

Het product kan opgevouwen worden voor transportdoeleinden; het wordt aanbevolen om de hulpstukken eerst naar binnen te vouwen zodat ze beschermd worden tijdens transport.

Niet bewaren met scherpe voorwerpen.

Niet bewaren bij hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid. De draagbanden moeten worden vervoerd en opgeslagen bij -10°C tot +50°C en bij een normale luchtvochtigheid van 30% -75%.

10 Periodieke inspectie

Een inspectie moet minstens één keer per jaar worden uitgevoerd door getraind personeel. Gebruik geen tilbanden tenzij ze na inspectie geschikt zijn bevonden voor gebruik bij een patiënt door het getrainde personeel. Er moet een logboek worden bijgehouden en het productlabel moet worden gemarkeerd om deze inspecties te registreren.

Tilbanden moeten worden weggegooid als:

- Een label is onleesbaar geworden
- De clips en/of bandjes vertonen tekenen van beschadiging of slijtage
- De rand van de tilband vertoont tekenen van beschadiging of slijtage
- Er zijn scheuren
- Er zijn gaten
- Er is sprake van onverwachte verkleuring
- Er zit een steek/stiksel los

Als u hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de United Care Klantenservice of de regiomanager in uw regio.

11 Problemen oplossen

Als het product niet goed werkt, controleer dan het volgende:

| Klacht | Mogelijke oorzaak | Actie |
|---|--|---|
| De clip vergrendelt niet | Kapotte clip Kapot bandje | Tilband vervangen |
| iQ clip gaat niet open bij het losmaken | De riem blijft gespannen als er kracht op wordt uitgeoefend Scharnier is kapot of werkt niet goed | Laat de lift zakken en zorg ervoor dat de bandjes los zijn. De tilband vervangen |
| UCP-clip wordt niet bevestigd | Verkeerde tillift of verkeerde tiljukwordt gebruikt | Controleer de compatibiliteit van het hijsgereedschap en de tillift |
| De tilband past niet | Verkeerde maat | Controleer de maatsectie en pas indien nodig de tilbandmaat aan |
| Tilband heeft een paarse kleur | Tilband is gewassen met bleekmiddel | De tilband vervangen |
| Tilband ruikt vies of ziet er vies uit | Niet goed of vaak genoeg gewassen | De tilband wassen |
| De patiënt glijdt uit de tilband | Verkeerde maat De patiënt heeft niet genoeg fysieke kracht | Controleer de maatsectie en wijzig de hijsbandmaat indien nodig. Evalueer opnieuw de fysieke mogelijkheden van de patiënt en welke uitrusting het meest geschikt is. |

12 Levensduur van de Tilband











De productiedatum staat op het productlabel. Bij normaal gebruik (twee wasbeurten per week) is de verwachte levensduur twee jaar. De totale levensduur is echter afhankelijk van het gebruik, het onderhoud en de opslag van het product. Daarom wordt een visuele inspectie aanbevolen voor elk gebruik, zie sectie Voor gebruik onder hoofdstuk 4.

Als een van deze punten van toepassing is of bij twijfel over de staat van de tilband, moet het product worden weggegooid om de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Afdankte producten kunnen worden gerecycled als plastic volgens de plaatselijke autoriteiten.

13 Garantie

Uniqare Quality Slings BV/United Care Products BV geven 1 jaar garantie op de tilbanden. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage of onzorgvuldig gebruik. De garantie geldt niet voor schade of gebreken aan het product die kunnen ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling ligt bij United Care Products of bij een door United Care Products aan te wijzen vertegenwoordiger.

14 Symbolentabel

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Dit product voldoet aan de vereisten van de Medical Device Regulation 2017/745 |  | Visuele inspectie |
|  | Medisch hulpmiddel |  | Lees de handleiding |
|  | Let op |  | Referentienummer (artikelnummer van het product) |
|  | Fabrikant informatie |  | Serienummer |
|  | Klasse I product voor medische hulpmiddelen dat voldoet aan de vereisten van UK MDR 2002 voor medische hulpmiddelen (MDD 93/42/EEC) |  | Maximaal toelaatbaar gewicht/belasting patiënt/bewoner. |

15 Een incident melden

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar de zorgverlener en/of de patiënt is gevestigd.

16 Productlijst

Tilvest

| Art. nr. | Beschrijving |
|-----------|--------------------------------|
| 30100352C | Tilvest de luxe, UCP-clip, S |
| 30100353C | Tilvest de luxe, UCP-clip, M |
| 30100354C | Tilvest de luxe, UCP-clip, L |
| 30100355C | Tilvest de luxe, UCP-clip, XL |
| 30100356C | Tilvest de luxe, UCP-clip, XXL |

| Art. nr. | Beschrijving |
|-----------|-------------------------------|
| 30100352Q | Tilvest de luxe, IQ-clip, S |
| 30100353Q | Tilvest de luxe, IQ-clip, M |
| 30100354Q | Luxe tilvest, IQ-clip, L |
| 30100355Q | Tilvest de luxe, IQ-clip, XL |
| 30100356Q | Tilvest de luxe, IQ-clip, XXL |

Lowzone band

| Art. nr. | Beschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 10109034C | Lowzone band, UCP-clip, std |

| Art. nr. | Beschrijving |
|-----------|----------------------------|
| 10109034Q | Lowzone band, IQ-clip, std |

Over Uniqare

Uniqare Quality Slings ontwikkelt en produceert een groot assortiment tilbanden voor de zorgsector. Als zusteronderneming van United Care levert Uniqare vanzelfsprekend ook kwalitatief hoogstaande producten die voldoen aan de CE richtlijnen. Opgericht in 2016 is Uniqare een jong en dynamisch bedrijf met ervaren, gedreven en betrokken medewerkers.

Van ontwerp, materiaalkeuze tot clip, alles wordt in eigen huis bepaald. Dankzij de jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn onze tilbanden ontwikkeld met het oog op veiligheid en maximaal comfort voor de cliënt en gebruiksgemak voor de zorgverlener. Als innovatief bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in stoffen en andere materialen voor het vervaardigen van onze tilbanden.

Uniqare vervaardigt tilbanden voor de Nederlandse markt en zelfs wereldwijd. Ook zijn er bij ons mogelijkheden om onder private label voor derden een eigen tilbanden lijn te produceren. Mocht u interesse hierin hebben, dan kunt contact met ons opnemen. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.



Medisch hulpmiddel klasse I. Het product voldoet aan de vereisten van de Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



Klasse I product voor medische hulpmiddelen dat voldoet aan de vereisten van UK MDR 2002 voor medische hulpmiddelen (MDD 93/42/EEC)



UniQare Quality Slings B.V.
Bremenweg 5
9723 TC Groningen
The Netherlands
+31 (0)50 3050980
Info@unitedcare.nl
www.unitedcare.nl

UK Responsible Person:

Direct Healthcare Group
Withey Court, Western Industrial Estate,
Caerphilly CF3 1BF, United Kingdom
44 (0) 800 043 0881
www.directhealthcaregroup.com
Info@directhealthcaregroup.com

